

95

ソケットの回転の仕方

操作方法

- ①ピンを指で押しながらソケットを回転させてください。
- ②ソケットの穴がピンの上にくると自動的に固定します。

使用するとき

ソケットの先端を爪先板が付いている方向へ向けて固定してください。


保管するとき

左右のソケットの先端が向き合う方向にして固定してください。

手すりの設置の仕方

- ① ソケットの先端を天板の下へ入れそのまま奥へ押込む。
(図の位置まで)
- ※1 天板裏の中央部にソケットの先端が引っ掛っているか確認してください。
- ② L型ボルトの先端を天板に引っ掛けながら蝶ナットで締付ける。
- ※2 締付け後、天板にL型ボルトが引っ掛っているか確認してください。

絵の通り設置できているか確認してから使用してください。

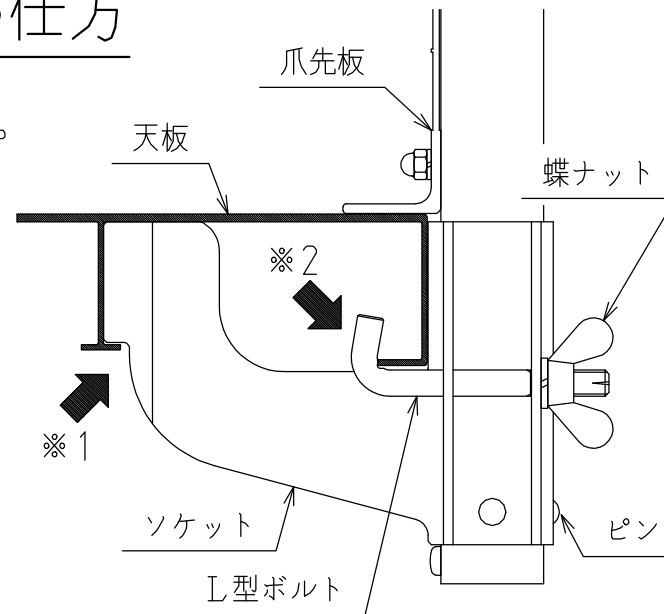

95